

Så används hjärtstartaren

ZOLL AED Plus hjärtstartare är enkel att använda och vägleder livräddaren genom hela behandlingsförloppet.


1 Kontrollera medvetandet

Kontrollera medvetandet och andning. Kalla på hjälp och ring 112.



2 Starta hjärt-lung-räddning

Hjärt-lung-räddning startas medan hjärtstartaren hämtas.

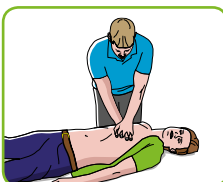


3 Starta hjärtstartaren

Följ hjärtstartarens instruktioner.




4 Anslut elektroderna

Avlägsna kläder och anslut elektroderna enligt anvisningarna.

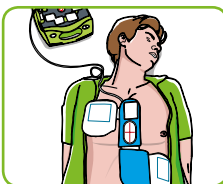


5 Defibrillering

Tryck på den blinkande knappen om du uppmanas till detta. Rör inte personen.

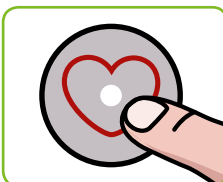

6 Följ instruktionen

Följ instruktionerna till ambulans anländer.

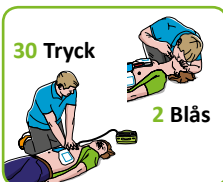

ZOLL®

ZOLL Medical Corporation är en av världens största tillverkare av defibrillatorer (hjärtstartare). Verksamhetens rötter går tillbaka mer än 50 år, när Professor Paul Zoll, Harvard Medical School, utförde de första kliniska studierna med extern defibrillering och pacing på människor.

ZOLL utvecklar idag lösningar som ökar chansen att överleva hjärtstopp.

ZOLL's unika produkter har gjort dem till en av USA's snabbast växande företag. Bland kunderna i Sverige finns en mängd sjukhus, ambulansorganisationer samt andra offentliga och privata, verksamheter.

Rädda liv med en hjärtstartare

